

はじめにお読みください

- ・インストールする端末の動作環境をお確かめください。
- ・ZioCubeのインストールをはじめとするご利用の流れでは一部にWEBでの操作が必要になります。インターネットに接続されていない環境でZioCubeをご利用される場合は、WEBに接続が可能な端末でお手続きのうえ、必要なファイルなどはリムーバブルデバイスなどにコピーしてご利用ください。
- ・ZioCubeのご利用ライセンスは、端末ごとに発行されます。ライセンスファイル名はコンピュータ名に基づき作成されるため、複数ライセンスご購入の場合は、インストールする端末のコンピュータ名に重複のないようにしてください。

購入申込書はこちらから

https://www.zio.co.jp/ziocube/pdf/ZioCube_form.pdf

① お申し込み～お振込み

無期限ライセンスをご購入いただく場合は、購入申込書に必要事項を記入のうえ、FAXまたはメールにてお申し込みください。

- 手順 ① 弊社ホームページの購入申込書の重要事項をよくご確認のうえ、必要事項を記入し FAX またはメールにてお申し込みください。
- ② FAX でお申し込み後、お申し込み受領のご案内をメールでご案内いたします。
- ※3営業日以内にメールが届かない場合は、ZC_order@zio.co.jp までメールでお問い合わせください。
- ③お申し込みの受付後3営業日以内に、お支払いのご案内とご請求書をメールにて送付いたします。期日までに指定口座へお振り込みをお願いいたします。

※お振り込みの控えをもって、弊社の領収書にかえさせていただきます。ご了承ください。

② インストール

無料体験版をご利用いただき、同じ端末で無期限ライセンス版をご利用されるお客様は「③端末情報ファイルの作成～ご送付」より手順を進めてください。

ご入金を確認後、メールにてお客様ページをご案内いたします。
必要に応じ、改めてダウンロード及びインストールをしてください。

- 手順 ① SetupZioCube.exe ファイルをダブルクリックして実行してください。
- ② OS やハードディスク等、必要条件の確認をします。項目の状態を確認し、「インストールを続ける」ボタンをクリックするとセットアップウィザードが起動します。
- ③ セットアップウィザードにしたがい、インストールを開始します。
※使用許諾書をよくお読みいただき、ご同意のうえインストールしてください。



▲ 必要条件の確認

③ 端末情報ファイルの作成～ご送付

ZioCubeを起動し、端末情報ファイルを作成し、メールにてご送付ください。

- 手順 ① ご利用になる端末にインストール後に ZioCube を起動すると、ライセンス認証画面が表示されます。「作成」ボタンをクリックし、端末情報ファイル（ファイル名：HostInfo_●●●）を保存します。
- ② ZioCube で作成した端末情報ファイルをメール添付にて ZC_order@zio.co.jp まで送信してください。




▲ ライセンス認証画面

注意：お申し込みいただいた台数分の端末情報ファイルを作成しご送付ください。

④ ライセンスのご登録

ご送付いただいた端末でのご利用ライセンスファイルをお送りいたします。
ライセンスファイルを登録いただくことで、ライセンス認証が完了します。

- 手順 ① ライセンスファイルを弊社より折り返しメール添付にてお送りいたします。
- ② ZioCube のライセンス認証画面に戻り、受信したライセンスファイル（ファイル名：License_HostInfo_●●●）を登録するとライセンス認証が完了します。
- ③ デスクトップ上の ZioCube アイコンをクリックし、起動をご確認ください。

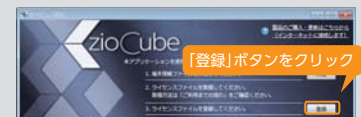

▲ ライセンス認証画面

注意：端末情報ファイルのファイル名と照合し、同じ名称のライセンスファイルをご登録ください。