



ご利用開始

1年間有効

## はじめにお読みください

- ・インストールする端末の動作環境をお確かめください。
- ・ZioCubeのインストールをはじめとするご利用の流れでは一部にWEBでの操作が必要になります。インターネットに接続されていない環境でZioCubeをご利用される場合は、WEBに接続が可能な端末でお手続きのうえ、必要なファイルなどはリムーバブルデバイスなどにコピーしてご利用ください。

## 1 お申し込み～インストール

無料体験版をご利用いただき、同じ端末で年間ライセンス版をご利用されるお客様は「②端末情報ファイルの作成～ご登録」より手順を進めてください。

インストーラはお申し込みフォームにてお申し込み後、メールにてご案内させていただいたURLよりダウンロードし、必要な端末にインストールしてください。

- 手順
- ① お申し込みフォーム (<https://www.zio.co.jp/ziocube/use/register.html>) にて、必要事項をご登録のうえお申し込みください。その後、ご登録メールアドレスにご案内させていただいた、お客様ページからインストーラをダウンロードします。
  - ② SetupZioCube.exe ファイルをダブルクリックして実行してください。
  - ③ OS やハードディスク等、必要条件の確認をします。項目の状態を確認し、「インストールを続ける」ボタンをクリックするとセットアップウィザードが起動します。
  - ④ セットアップウィザードにしたがい、インストールを開始します。  
※使用許諾書をよくお読みいただき、ご同意のうえインストールしてください。



## 2 端末情報ファイルの作成～ご登録

ZioCubeを起動し、端末情報ファイルを作成のうえお客様ページよりご登録ください。

- 手順
- ① ご利用になる端末にインストール後に ZioCube を起動すると、ライセンス認証画面が表示されます。「作成」ボタンをクリックし、端末情報ファイル（ファイル名：HostInfo\_●●●）を保存します。
  - ② お客様ページで、端末上で作成した端末情報ファイルを登録すると、ご購入のお手続きが可能になります。



※端末情報ファイルとは、インストールする端末とライセンスを紐付けるためのハードウェア識別情報です。個人を特定できる情報は含んでおりません。

※ライセンス認証画面は、スタートメニュー（Windows8及び8.1の場合は、「アプリ」一覧）から起動することができます。

## 3 ご購入お手続き

クレジットカード決済お手続きを完了してください。

- 手順
- ① 端末情報ファイルを登録後、クレジットカード情報の入力画面で必要事項を入力し、決済手続きを完了してください。お申込者名と同一の名義のクレジットカードのみご利用いただけます。

※ブラウザのポップアップページの表示を有効にしてお手続きを進めてください。

※弊社では「ソニーペイメントサービス株式会社」の提供するクレジットカード決済システムを採用しております。



## 4 ライセンスのご登録

クレジットカード決済のお手続きが完了すると、年間ライセンスが発行されます。ライセンスファイルを登録いただくことで、ライセンス認証が完了します。

- 手順
- ① クレジットカードの決済手続きが完了すると、ライセンスファイルがダウンロード可能になります。
  - ② ライセンスをダウンロードし、ZioCubeのライセンス認証画面に戻り、ライセンスファイル（ファイル名：License\_HostInfo\_●●●）を登録するとライセンス認証が完了します。
  - ③ デスクトップ上の ZioCube アイコンをクリックし、起動をご確認ください。

※ライセンスの有効期限は ZioCube を起動し、画面右下の Ziosoft マークからご確認ください。



③ ライセンスのダウンロードから再ダウンロードすることも可能です